


SoClean.2[®]

Benutzerhandbuch PAP-Desinfizierungsgerät

Für alle PAP-Geräte (*Positiver Atemwegsdruck*)

CPAP, APAP, Bi-PAP

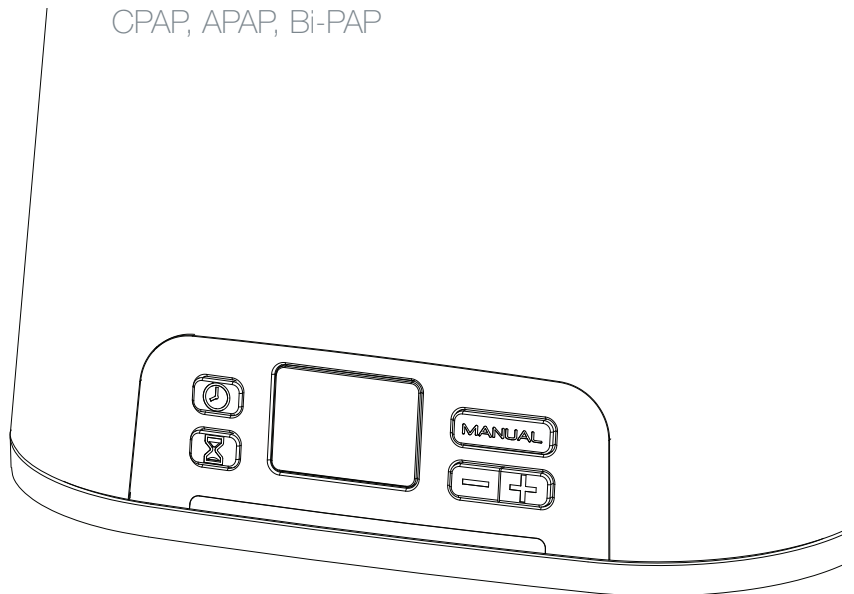

Vielen Dank,

dass Sie sich für den Kauf eines SoClean 2 PAP-Desinfizierungssystems entschieden haben.

Bitte machen Sie sich mit diesem Handbuch und dem Betrieb des Geräts vertraut. Nach einigen wenigen einfachen Schritten werden Sie feststellen, dass die tägliche Desinfizierung Ihres PAP-Geräts noch nie so einfach war. Das SoClean-Desinfizierungsverfahren beseitigt Bakterien, Schimmel, Viren und andere Krankheitserreger, ohne dass Wasser oder unsaubere, flüssige Chemikalien erforderlich sind.

Bei BetterRest Solutions setzen wir uns dafür ein, innovative und sichere Verfahren bereitzustellen, welche die Gesundheit und das Wohlbefinden von PAP-Benutzern verbessern. Bei Fragen oder Anliegen können Sie sich jederzeit gerne über www.betterrestsolutions.com an uns wenden.











1. Indikationen für die Verwendung, Vorsichtsmaßnahmen und technische Daten.....	4
2. Im Lieferumfang Ihres SoClean enthalten	5
3. Wichtiges Zubehör	6
4. Informationen zu Ihrem PAP-Gerät.....	7
5. Erste Schritte.....	8
6. Zeitschaltuhr und Bildschirm Ihres SoClean	11
Einstellung Ihrer Sprache.....	12
Einstellung der Uhr.....	12
Einstellung der Laufzeit und Dauer	12
Manueller Modus	13
24-Stunden-Uhr.....	13
Zyklusanzeigeleuchte	14
Bildschirmnachrichten.....	14
7. Verwendung Ihres SoClean.....	15
8. Pflege und Wartung Ihres SoClean	17
9. FAQ.....	18
10. Einstufung, Symbole, FCC-Hinweis	19

Indikationen für die Verwendung, Vorsichtsmaßnahmen und Technische Daten

Indikationen für die Verwendung: Bei dem SoClean handelt es sich um ein allgemeines Desinfizierungsgerät zum Einsatz für die positive Überdruckbeatmung (Positive Airway Pressure - PAP), das zur Verwendung zu Hause und in medizinischen Einrichtungen bestimmt ist. Ein Patient, der PAP-Beatmung zur Behandlung einer obstruktiven Schlafapnoe (OSA) einsetzt, kann den SoClean zur Desinfizierung seines PAP-Geräts verwenden, falls die täglichen Reinigungsverfahren nicht eingehalten werden oder der Patient die zusätzlichen Vorteile einer gründlichen Desinfizierung seines PAP-Geräts nutzen möchte.

Der SoClean wurde für eine dauerhafte Befestigung an dem PAP-Gerät eines Patienten ausgelegt, ist jedoch nur in Betrieb, wenn sich die Maske in der Desinfizierungskammer befindet.


Kontraindikationen für die Verwendung: Der SoClean kann nicht eingesetzt werden, falls duftende Essenzen im PAP-Wasserbehälter oder stark duftende Reinigungsmittel zur Reinigung des PAP-Geräts verwendet werden. Stellen Sie den Betrieb ein, falls sich Akne oder einen Ausschlag entlang der Berührungslinie der Maske entwickelt.

-  **GEFAHREN:** Von Wasserquellen fernhalten, darunter Regen, Badewannen, Spülbecken und Schwimmbecken.
-  **GEFAHREN:** Von Kindern fernhalten. Das Gerät ist kein Spielzeug!
-  **GEFAHREN:** Nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, in der Nähe von Gas-Dampf-Gemischen oder anderen entzündlichen Materialien etc. verwenden.
-  **GEFAHREN:** Keine Gegenstände auf das SoClean-Gerät legen, insbesondere entzündliche oder entflammbare Gegenstände.
-  **GEFAHREN:** Niemals Lebewesen in das Gerät einführen.
-  **ACHTUNG:** Das SoClean-Gerät nicht auseinanderbauen.
-  **ACHTUNG:** Trennen Sie den AC-Netzadapter von der Wandsteckdose, wenn Sie Ihr SoClean-Gerät nicht verwenden.
-  **ACHTUNG:** Bitte beachten Sie, dass sich im Inneren des SoClean empfindliche elektronische Bauteile befinden. Falls Sie Ihren SoClean reinigen müssen, wischen Sie diesen bitte mit einem feuchten Tuch ab. Tauchen Sie Ihren SoClean nicht ein bzw. verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, um das Innere der SoClean-Kammer zu reinigen.


Technische Daten

Elektrische Eigenschaften	
Stromverbrauch:	18W Max
Umwelteigenschaften	
Betrieb:	10 °C bis 38 °C 15 % bis 70 % Luftfeuchtigkeit
Lagerungs- und Transportbedingungen:	20 °C bis +55 °C 15 % bis 70 % Luftfeuchtigkeit
Physikalische Eigenschaften	
Abmessungen:	19 cm x 16,5 cm x 21,5 cm
Gewicht:	2,5 kg
Kabellänge:	1,4 m
Technische Daten des Adapters	
Hersteller:	Ktech
Artikelnummer:	KSAS0151200150D5
Eingang:	100 - 240 VAC, 50/60Hz, 0,4 A
Ausgang:	12VDC, 1,5 A

Im Lieferumfang Ihres SoClean enthalten

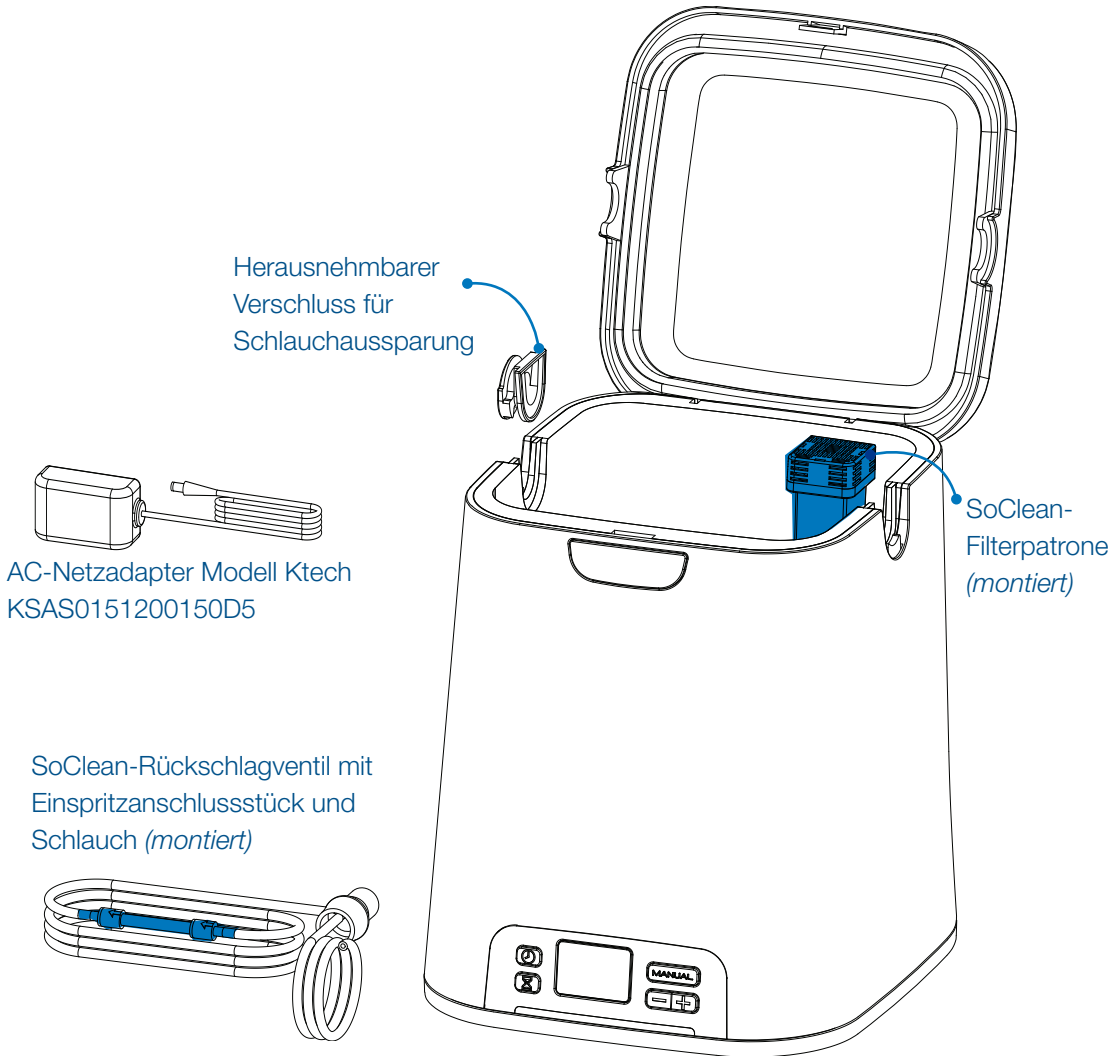


Wichtiges Zubehör

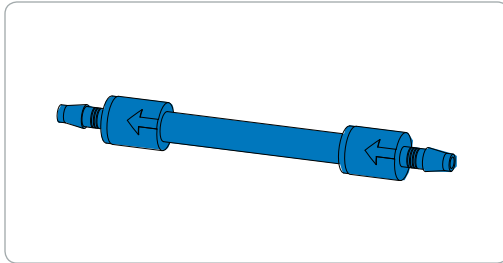

Rückschlagventil (montiert)

Verhindert, dass in Ihrem Befeuchtungsbehälter befindliches Wasser in Ihr SoClean-Gerät zurückgeführt wird. Falls Sie im durchsichtigen Schlauch Wasser sehen, tauschen Sie die Rückschlagventilbaugruppe bitte umgehend aus.

Alle 6 Monate oder dann austauschen, wenn das SoClean-Gerät die Nachricht „Filtersatz bestellen“ anzeigt.

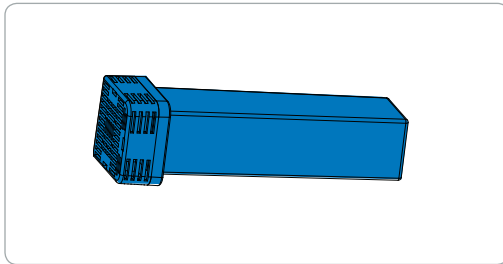

Filterpatrone (montiert)


Dieser Filter wandelt aktivierten Sauerstoff zurück in normalen Sauerstoff.

Alle 6 Monate oder dann austauschen, wenn das SoClean-Gerät die Nachricht „Filtersatz bestellen“ anzeigt.


Informationen zu Ihrem PAP-Gerät

Der SoClean wurde dafür ausgelegt, an Ihrem PAP-Gerät befestigt zu werden. Dieses Handbuch bezieht sich auf einige der einzelnen Komponenten Ihres PAP-Geräts. Bitte verwenden Sie das untenstehende Diagramm, um sich mit diesen Begriffen vertraut zu machen, bevor Sie fortfahren.

Bitte beachten Sie, dass es viele Arten von PAP-Geräten gibt. Dieses Diagramm ist nur als Beispiel gedacht.

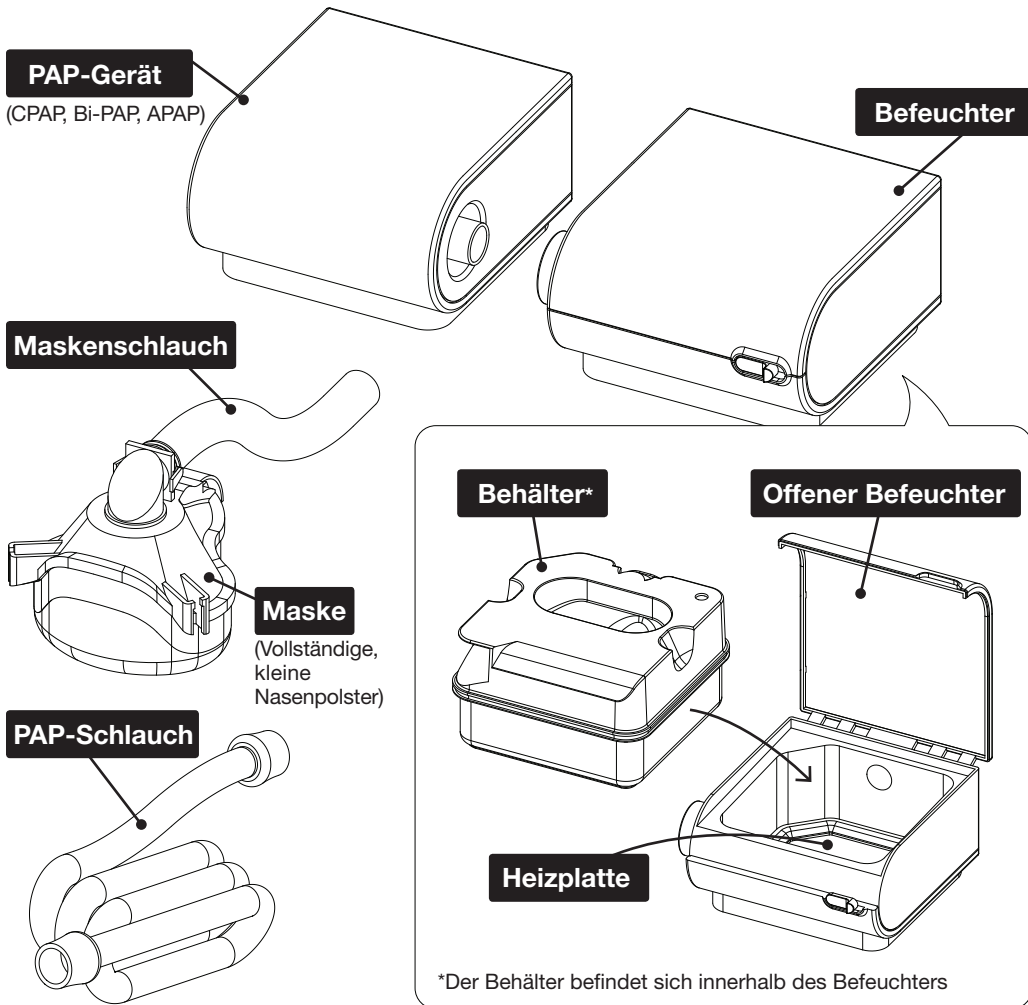


Erste Schritte

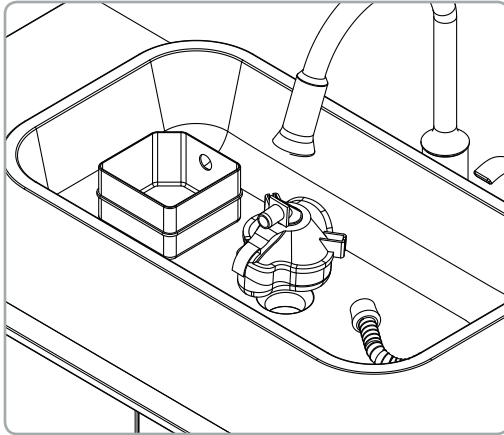

1. Vorreinigung Ihres PAP-Geräts

Verwenden Sie ein wohlriechendes Spülmittel mit 4 Litern Wasser, um Ihr PAP-Gerät zu waschen (Maske, Schlauch und Behälter). Spülen Sie es dann gründlich mit sauberem Wasser aus.

Hinweis: Beim Betrieb des SoClean werden keine Flüssigkeiten eingesetzt. Dank der Vorreinigung Ihres Geräts werden vorhandene Gerüche neutralisiert. Tauchen Sie Ihren SoClean NICHT in Wasser.

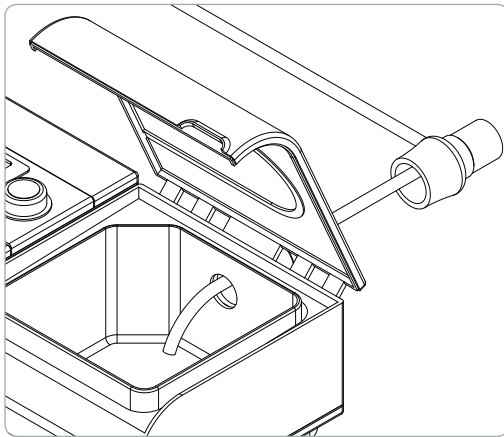


2. Montage des Einspritzanschlusstücks

Das Einspritzanschlusstück verbindet den SoClean mit Ihrem PAP-Gerät. Einmal montiert muss das Einspritzanschlusstück nicht mehr getrennt werden, um Ihr PAP-Gerät zu verwenden. Sie können den SoClean mit Ihrem PAP-Gerät verbunden lassen. Bezüglich weiterer Anleitungen zur Verbindung Ihres spezifischen PAP-Geräts besuchen Sie bitte unsere Website unter www.betterrestsolutions.com.

Mit Befeuchter: Trennen Sie Ihren PAP-Schlauch von Ihrem PAP-Gerät. Schließen Sie das Einspritzanschlusstück am Anschluss Ihres Befeuchters an, sodass die kleinere Schlauchleitung in den Behälter eingeführt ist. Das Ende der Schlauchleitung sollte in der Nähe des Behälterbodens über der Heizplatte aufliegen. Kürzen Sie gegebenenfalls die Einspritzschlauchleitung stückweise auf die korrekte Länge.


Fortsetzung ... Erste Schritte

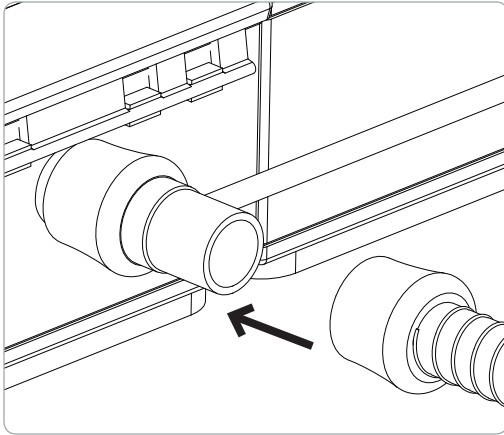

Schließen Sie Ihren PAP-Schlauch jetzt an dem Ende des Einspritzanschlussstücks an.

Sie können Ihren SoClean mit oder ohne Wasser im Befeuchterbehälter betreiben. Der SoClean desinfiziert sämtliches Wasser im Befeuchterbehälter, solange das Ende der Einspritzschlauchleitung auf oder in der Nähe des Behälterbodens aufliegt und sich unter dem Wasserpegel befindet.





Hinweis: Unterschiedliche Behälter erfordern eventuell unterschiedliche Vorgehensweisen zur Einführung des Schlauchs. Bei Problemen besuchen Sie bitte www.BetterRestSolutions.com bezüglich weiterer Informationen zu den verschiedenen Befeuchtermodellen oder wenden Sie sich direkt an Better Rest Solutions unter der Telefonnummer +1-866-501-3705.

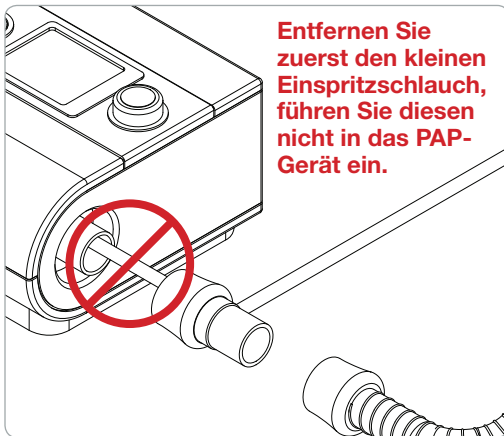

Ohne Befeuchter: Falls Sie derzeit keinen Befeuchter verwenden, entfernen Sie bitte die kurze schwarze Schlauchleitung aus dem Inneren des Einspritzanschlussstücks, indem Sie diese gerade herausziehen, und befestigen Sie dann das Anschlussstück direkt an Ihrem PAP-Gerät. Schließen Sie Ihren PAP-Schlauch wieder an dem Ende des Einspritzanschlussstücks an.

Falls Sie Unterstützung bei der Verbindung mit Ihrem spezifischen Gerät benötigen, besuchen Sie bitte unsere Supportseiten unter www.BetterRestSolutions.com/support/soclean-support/

Erste Schritte ... Fortsetzung

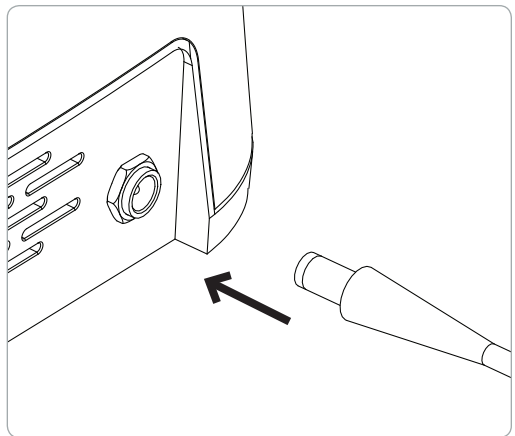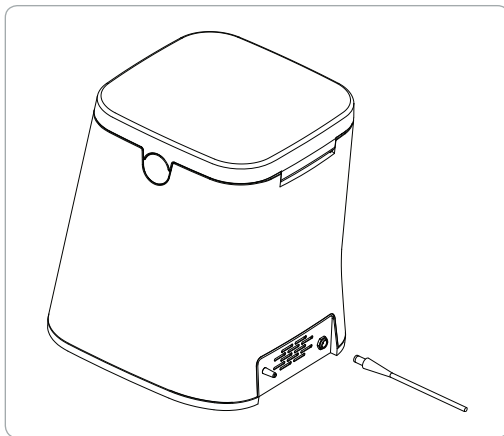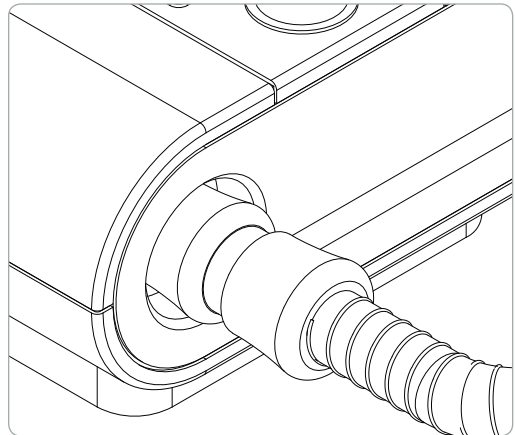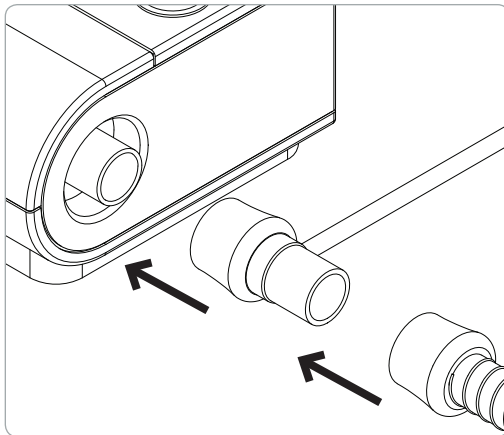


3. Einschalten

Stecken Sie Ihren AC-Adapter in die Rückseite des SoClean-Geräts und verbinden Sie diesen dann mit einer Wandsteckdose. Stellen Sie nun Ihre Zeitschaltuhr ein.

Achtung: Positionieren Sie Ihr SoClean-Gerät so, dass der Netzadapter zugänglich ist, damit Sie Ihr SoClean-Gerät gegebenenfalls von der Stromversorgung trennen können.


Zeitschaltuhr und Bildschirm Ihres SoClean

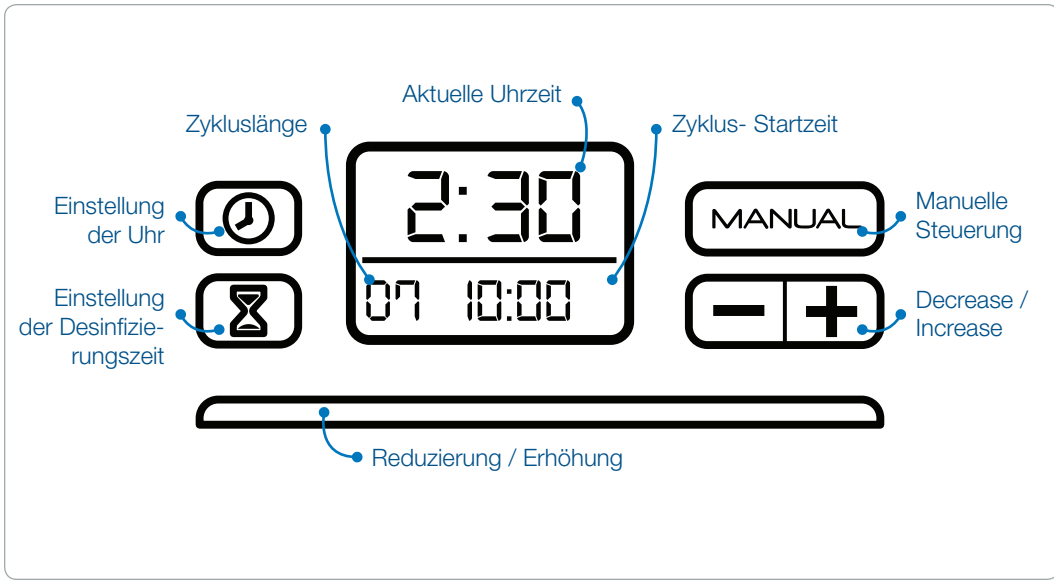

Mit Ihrer SoClean-Zeitschaltuhr können Sie Ihre tägliche Reinigung vollständig automatisch durchführen. Der SoClean ist werksseitig darauf eingestellt, um 10:00 Uhr eine 7-minütige Reinigung zu starten. Stellen Sie die Uhr zuerst auf Ihre aktuelle Zeit ein. Sie können diese Einstellungen leicht ändern, indem Sie die auf den nächsten Seiten angegebenen Schritte befolgen.

Falls Sie den SoClean vom Strom trennen oder ein Stromausfall auftritt, müssen Sie nur die aktuelle Zeit erneut einstellen. Die Desinfizierungseinstellungen bleiben gespeichert. Betreiben Sie Ihren SoClean zwecks sicherer Nutzung nur gemäß den Anleitungen in diesem Handbuch.

Zeitschaltuhr und Bildschirm Ihres SoClean ... Fortsetzung

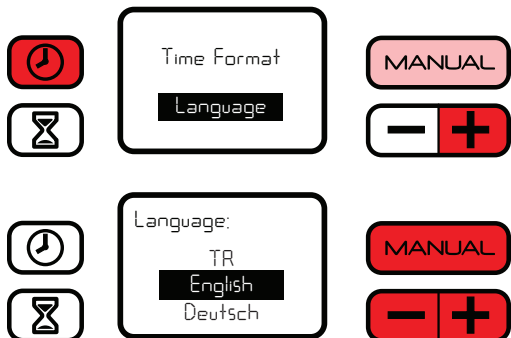


Einstellung Ihrer Sprache

Drücken Sie die und Tasten.

Drücken Sie auf oder , um zu Ihrer Sprache zu navigieren und drücken Sie zu Auswahl dann auf .


Falls Sie zum Hauptmenü zurückkehren wollen, drücken Sie auf „Uhr“.

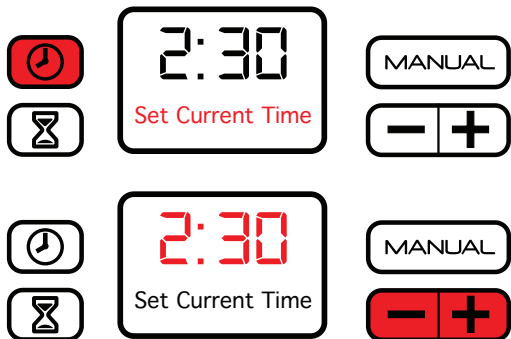

Einstellung der Uhr

Drücken Sie die Taste.

Ändern Sie die Uhrzeit, indem Sie die Taste oder drücken, bis Ihre aktuelle Uhrzeit erreicht ist. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, läuft die Zeit schneller. Drücken Sie erneut die Taste , um Ihre Uhrzeit zu speichern und zum Startbildschirm zurückzukehren.

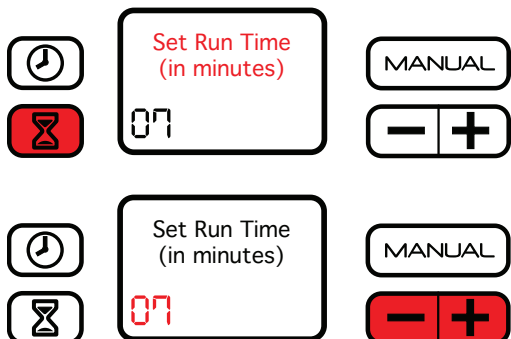

Einstellung der Durchlaufzeit und Dauer

Drücken Sie die Taste.

Drücken Sie die Taste oder , um die Anzahl der Minuten Ihrer Durchlaufzeit zu reduzieren oder zu erhöhen.




Hinweis: Eine Durchlaufzeit von 5 bis 10 Minuten sollte ausreichen, um Ihr Gerät vollständig zu desinfizieren.

Fortsetzung ... Zeitschaltuhr und Bildschirm Ihres SoClean




Drücken Sie die  Taste erneut. Jetzt werden Sie aufgefordert, die Tageszeit einzustellen, zu der Ihr SoClean laufen soll.



Verwenden Sie die Taste  oder , um die gewünschte Zeit einzustellen. Drücken Sie die  Taste erneut, um Ihre Einstellungen zu speichern und zum Startbildschirm zurückzukehren.







Manueller Modus


Falls Sie Ihr Gerät zu einer anderen Zeit als während des geplanten Zyklus desinfizieren wollen, legen Sie Ihre Maske einfach wie üblich in den SoClean und drücken Sie die  Taste. Der SoClean läuft dann entsprechend Ihrer voreingestellten Durchlaufzeit. Ihre Zeitschaltuhreinstellungen werden davon nicht verändert. Bitte warten Sie wie bei Ihrem normalen Desinfizierungsverfahren auf das grüne Licht, bevor Sie Ihre Maske herausnehmen. Bei Fragen zur Status-Anzeigeleuchte lesen Sie bitte die FAQ auf Seite 18.

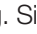

24-Stunden-Uhr

Falls Ihre Uhr die Uhrzeit im 24-Stunden-Format anzeigen soll, drücken Sie die Tasten  und  gleichzeitig. Sie werden dann aufgefordert, zwischen dem 12- und 24-Stunden-Format zu wählen. Verwenden Sie die  Taste, um das Stunden-Format auszuwählen. Drücken Sie dann die  Taste, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Zeitschaltuhr und Bildschirm Ihres SoClean ... *Fortsetzung*

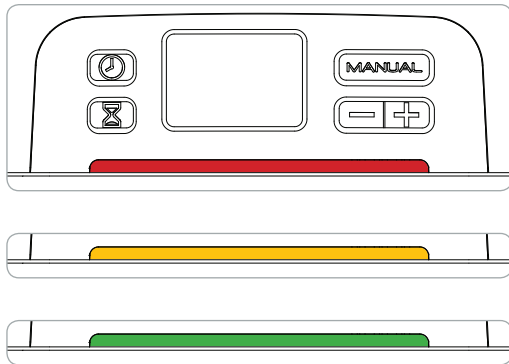

Zyklusanzeigeleuchte

Der Leuchtbalken unter der Uhranzeige zeigt den Status des SoCleans an.

ROT, wenn der SoClean in Betrieb ist und aktivierten Sauerstoff erzeugt.

GELB, wenn der SoClean sich in dem 2-stündigen Desinfizierungszyklus befindet.

GRÜN, wenn die Desinfizierung erfolgreich abgeschlossen wurde.

Die Leuchtanzeigen erlöschen, sobald der Deckel angehoben wird. Bei Fragen zur Status-Anzeigeleuchte sehen Sie bitte die FAQ auf Seite 18.

Vorsicht: Bei der Einatmung von aktiviertem Sauerstoff begeben Sie sich zu einem offenen Bereich und atmen Sie frische Luft wie üblich ein. Suchen Sie bei Auftreten von Atembeschwerden einen Arzt auf.




Bildschirmnachrichten

Kein Schlauch vorhanden Der Zyklus wird nicht durchgeführt: Diese Nachricht wird während des manuellen Modus angezeigt, wenn keine Maske und kein Schlauch im SoClean vorhanden, der Deckel nicht korrekt geschlossen ist oder der Verschluss der Schlauchausparung fehlt oder falsch sitzt.


Filtersatz bestellen: Diese Nachricht wird nach ca. 6 Monaten zur Erinnerung angezeigt um einen Ersatzfilter und ein Rückschlagventilsatz zu bestellen.

Verwendung Ihres SoClean

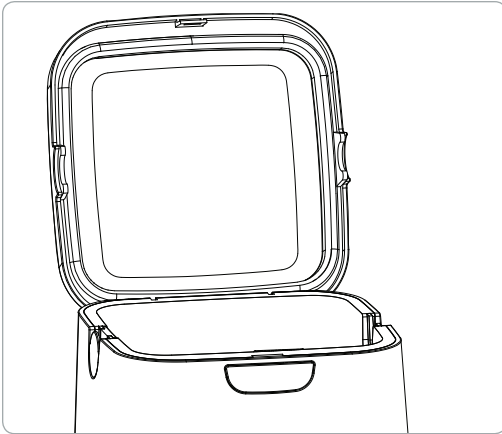


Nach der anfänglichen Einrichtung ist die Verwendung Ihres SoClean-Geräts äußerst einfach. Sie müssen zur täglichen Desinfizierung Ihres Geräts keine Komponenten ausbauen.

1. Öffnen Sie den Deckel.

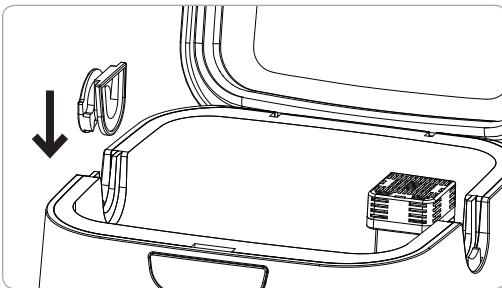


2. Stecken Sie den herausnehmbaren Verschluss in eine der offenen Schlauchausparungen ein.

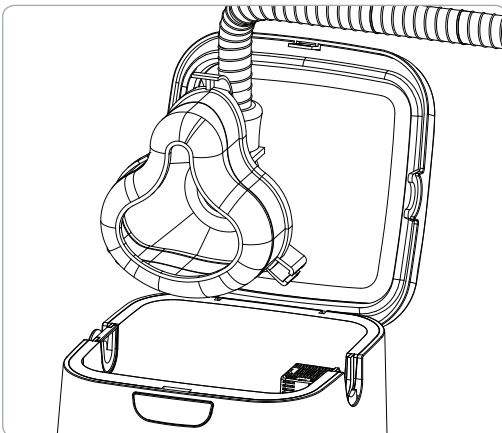

3. Führen Sie Ihre Maske in die Kammer ein, legen Sie dabei den an ihr befestigten Schlauch in die geöffnete Schlauchausparung.

Hinweis: Der SoClean bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Maske und den Schlauch von beiden Seiten des Geräts einzuführen. Zum Wechsel der Seiten entfernen Sie den Verschluss der Schlauchausparung aus seiner Position, indem Sie diesen gerade herausziehen, und führen diesen in die Ausparung der gegenüberliegenden Seite ein.

Verwendung Ihres SoClean ... *Fortsetzung*

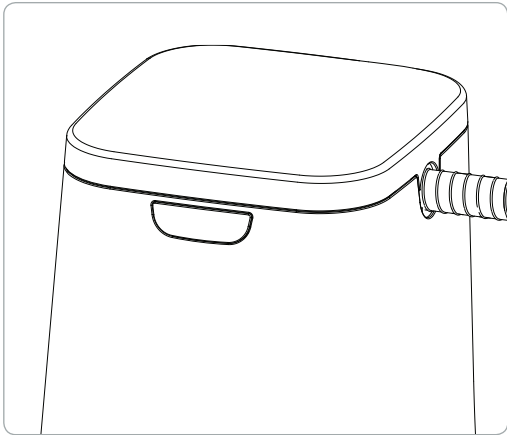

4. Schließen Sie den Deckel.

Der SoClean wird nun entsprechend der voreingestellten Uhrzeit und Dauer betrieben.

Hinweis: Der SoClean kann nicht betrieben werden, wenn die Maske und der Schlauch nicht in der sicher geschlossenen Kammer vorhanden sind. Der SoClean kann darüber hinaus nicht betrieben werden, falls der Verschluss der Schlauchausparung fehlt oder falsch sitzt.

Wichtig: Obwohl die tatsächliche Durchlaufzeit des SoClean lediglich 5 bis 10 Minuten betragen kann, muss die Maske mindestens 2 weitere Stunden in der geschlossenen Kammer verbleiben. Nach diesem Zeitraum leuchtet die Zyklusanzeigeleuchte grün, um anzuzeigen, dass die gesamte Desinfizierung abgeschlossen ist und die Maske nun aus der Kammer entnommen werden kann.


5. Sobald der Zyklus abgeschlossen ist, öffnen Sie den Deckel, entfernen die Maske und den herausnehmbaren Verschluss der Schlauchausparung. Bewahren Sie den Aussparungsverschluss innerhalb der SoClean-Kammer auf.

Pflege und Wartung Ihres SoClean


Sie können den SoClean mit einem feuchten Tuch abwischen.

Das Rückschlagventil und die Filterpatrone des SoClean sollten alle 6 Monate ausgetauscht werden. Abhängig von der Nutzung erscheint nach ca. 6 Monaten eine Erinnerungsnachricht auf dem Bildschirm.


Zur Nachbestellung von Zubehörteilen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder besuchen Sie www.betterrestsolutions.com.

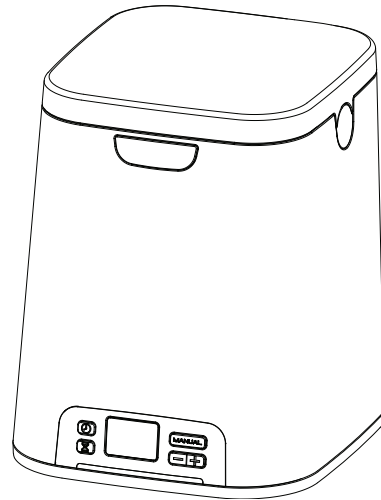

Filterpatronensatz – als Bausatz erhältlich

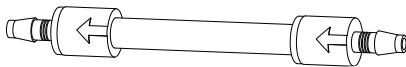

Rückschlagventil
ALLE 6 MONATE ODER DANN
AUSTAUSCHEN, WENN
DAS SOCLEAN-GERÄT DIE
NACHRICHT „FILTERSATZ
BESTELLEN“ ANZEIGT.

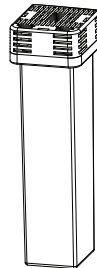

Patronenfilter
ALLE 6 MONATE ODER DANN
AUSTAUSCHEN, WENN
DAS SOCLEAN-GERÄT DIE
NACHRICHT „FILTERSATZ
BESTELLEN“ ANZEIGT.

FAQ

1. Wird mein PAP-Gerät vom SoClean nass?

Nein. Der SoClean desinfiziert mit aktiviertem Sauerstoff. Während dieses Verfahrens kommen keine Flüssigkeiten oder Wasser zum Einsatz.

2. Ist der SoClean für mich oder die Umwelt schädlich?

Nein. Der SoClean desinfiziert mit aktiviertem Sauerstoff. Dieselbe Desinfizierungstechnologie wird sicher bei Obst, Gemüse und Trinkwasser eingesetzt. Der SoClean erzeugt aktivierten Sauerstoff in einem geschlossenen System. Der aktivierte Sauerstoff desinfiziert Ihr Gerät und wird innerhalb von zwei Stunden auf natürliche Weise zu normalem Sauerstoff abgebaut. Zusätzlich dazu strömt aller Überschuss an aktiviertem Sauerstoff durch einen Filter, der diesen vor der Freisetzung zurück in normalen Sauerstoff verwandelt.

3. Woher weiß ich, dass mein SoClean wirklich desinfiziert?

Nach dem erfolgreichen Abschluss des Desinfizierungsverfahrens leuchtet die Statusanzeigeleuchte grün. Ihr PAP-Gerät wird einen milden, saubereren Geruch besitzen.

4. Was ist, wenn mit der vom SoClean hinterlassene Geruch zu stark ist? Versuchen Sie zuerst,

Ihr Geräte mit einem unparfümierten, farbstofffreien Spülmittel zu waschen. Falls der Geruch immer noch zu stark ist, können Sie auch einen dieser Schritte versuchen: (1) Bevor Sie Ihre Maske vor dem Schlafengehen aufsetzen, lassen Sie Ihr PAP-Gerät 20 Sekunden laufen, damit alle Restgerüche herausgeblasen werden. (2) Stellen Sie die Zeitschaltuhr so ein, dass das Gerät früher läuft und sich so alle Restgerüche bis zum Abend auflösen können. (3) Erhöhen Sie die Dauer der Zykluszeit einige Tage lang auf bis zu 12 Minuten und reduzieren Sie die Zeit dann wieder auf Ihre bevorzugte Einstellung. Ein starker Geruch deutet normalerweise auf eine große Menge oxidierter organischer Substanzen hin.

5. Was ist, wenn meine Anzeigeleuchte rot oder gelb leuchtet?

Dies bedeutet, dass das Desinfizierungsverfahren noch nicht abgeschlossen wurde. Bitte warten Sie, bis die Leuchte grün leuchtet, bevor Sie Ihr PAP-Gerät aus der SoClean-Kammer entfernen. (Bitte sehen Sie hierzu die Seite 14)

6. Der SoClean hat vor mehr als zwei Stunden einen Zyklus abgeschlossen, die Status-Anzeigeleuchte ist jedoch immer noch Gelb. Warum?

Einige Arten von Innenbeleuchtungen erschweren es, zwischen den gelben und grünen Leuchten auf dem SoClean zu unterscheiden. Falls mehr als zwei Stunden vergangen sind, seitdem der SoClean einen Zyklus abgeschlossen hat, ist Ihr PAP-Gerät desinfiziert und betriebsbereit.

7. Was ist, falls die Anzeigeleuchte nach einer geplanten Reinigungszeit nicht leuchtet?

Der SoClean konnte einen Desinfizierungszyklus nicht erfolgreich abschließen. Häufige Gründe hierfür sind, dass der Deckel nicht sicher geschlossen war, sich zur Reinigungszeit keine Maske in der Kammer befunden hat oder der Verschluss der Schlauchausparung fehlt bzw. nicht korrekt sitzt.

8. Was ist, wenn ich die geplante Desinfizierungszeit verpasst habe, meine Geräte aber trotzdem sterilisieren möchte?

Sie können die manuelle Funktion verwenden, um einen Zyklus durchlaufen zu lassen. (Bitte sehen Sie hierzu die Seite 13)

9. Warum zeigt mein Bildschirm „Filtersatz bestellen“ an?

Diese Nachricht wird abhängig von Ihrer Nutzung ca. alle 6 Monate als Erinnerung angezeigt, den Filter und das Rückschlagventil regelmäßig auszutauschen. Sie können den Filter und das Rückschlagventil zusammen als Patronenfiltersatz erwerben. Zur Nachbestellung wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder besuchen Sie www.betterrestsolutions.com.

10. Gibt es Materialien, die ich möglichst nicht in den SoClean legen sollte?

Nylon und Naturkautschuk werden beschädigt, wenn sie aktiviertem Sauerstoff ausgesetzt werden. Die meisten Hersteller verwenden diese Materialien normalerweise nicht für Behälter, Schläuche, Masken oder Kopfausrüstungen. Bei diesbezüglichen Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren PAP-Hersteller, den Lieferanten oder Better Rest Solutions.

11. Meine Maske fühlt sich fettig an, was soll ich tun?

Die Chemie der Haut ist einzigartig. Einige Personen mit fettiger Haut müssen die Maske eventuell gelegentlich von Hand waschen. Wenn Sie Ihre Maske von Hand waschen, achten Sie bitte darauf, ein unparfümiertes, farbstofffreies Spülmittel zu verwenden.

Einstufung, Symbole, FCC-Hinweis

EINSTUFUNG

Klasse IIa
Gemäß der Richtlinie 93/42/EWG (MDD) Anhang IX,
Abschnitt III, Regel 15
PAP-Desinfizierungsgerät

SYMBOLE



Bitte im Handbuch nachschlagen




Erfüllt die Richtlinie der Europäischen Union über Medizinprodukte.




Seriennummer



Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) Es liegt in der Verantwortung des Endbenutzers, dieses Gerät bei einer entsprechenden Sammelstelle zu entsorgen.

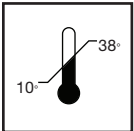

Betriebstemperaturbedingungen

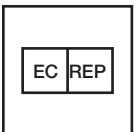

Niedergelassener Bevollmächtigter:
Eumena Medical Ltd. c/o - Friedrich Schwab
Qualtech House |Parkmore Business Park West
Ballybrit, Galway Ireland | Tel. No. 49 173 280 8345



Hersteller:
JDI Electronics Factory, Sima Industrial Zone,
Sima Village, Changping Town, Dongguan City
Guangdong Province 523570, China

FCC-HINWEIS

Bitte beachten Sie, dass Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität zuständigen Stelle genehmigt wurden, zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Gerät führen können.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften für digitale Geräte der Klasse B festgelegten Grenzwerte. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen elektromagnetische Störungen beim Betrieb in Wohngebieten gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und emittiert Hochfrequenzstrahlung und kann sich bei einer nicht den Anweisungen entsprechenden Installation und Verwendung negativ auf den Funkverkehr auswirken. Es besteht allerdings keine Garantie, dass in einer bestimmten Installation doch Störungen auftreten können. Sollte das Gerät Störungen im Rundfunk- und Fernsehempfang verursachen, was durch Aus- und Einschalten des Gerätes festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen anhand einer oder mehrerer der folgenden Vorgehensweisen zu beheben: -- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus bzw. stellen Sie sie um. -- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger. -- Schließen Sie das Gerät und den Funkempfänger an getrennte Stromkreise an. -- Bitten Sie einen Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Unterstützung.

BENUTZERHANDBUCH

**Bezüglich weiterer Informationen über den
SoClean 2
oder unsere anderen innovativen Produkte besuchen Sie
www.betterrestsolutions.com**



JDI ELECTRONICS FACTORY

Sima Industrial Zone, Sima Village, Changping Town
Dongguan City, Guangdong 523570, China



Eumena Ltd.

Eumena Medical Ltd. c/o - Friedrich Schwab
Qualtech House
Parkmore Business Park West
Ballybrit, Galway Ireland
Tel. No. 49 173 280 8345

Copyright © 2011-2014 www.betterrestsolutions.com
Better Rest Solutions ist ein Geschäftsbereich von Inceptus
SoClean® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Inceptus, Inc.
Oxford, MA USA 01540