


Auswahl der richtigen Größe für das „Unter-der-Nase“-Maskenkissen

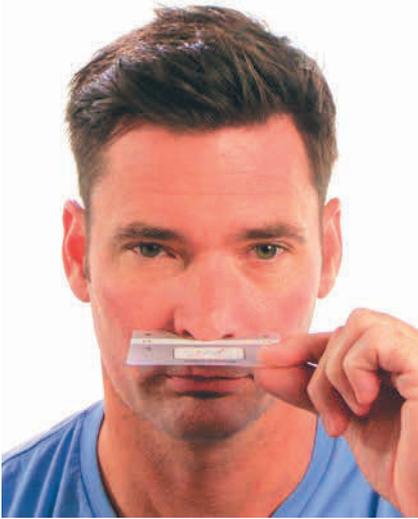

- Im Gegensatz zu den meisten anderen Mund-Nasen-Masken wird die Maskenkissengröße für die Amara View anhand der gemessenen Nasentiefe bestimmt.
- Nutzen Sie für die schnelle und einfache Auswahl der richtigen Größe für das „Unter-der-Nase“-Maskenkissen die Anpassschablone.
- Halten Sie die Anpassschablone unter die Nase des Patienten, ohne dabei Druck auf die Wangen auszuüben. Die Position der Nasenspitze zeigt an, ob ein Maskenkissen in der Größe S, M oder L erforderlich ist.
- **Tipp:** Bei Patienten, deren Messung zwischen zwei Größen liegt, bitte immer die jeweils kleinere Größe wählen.

Anleitung zur Anpassung der Maske



1 Lösen Sie das Kopfband. Drehen Sie dazu die Kopfband-Clips heraus.

2

Wählen Sie ein Maskenkissen, das den Mund abdeckt und am Nasenende aufliegt.



3 Halten Sie die Maske leicht an das Gesicht und ziehen Sie das Kopfband um den Kopf.

4

Stellen Sie sicher, dass die Nase sich über (und nicht in) der Kissenöffnung für die Nasenlöcher befindet.



5 Drücken Sie die Kopfband-Clips zum Feststellen wieder hinein.

6

Ziehen Sie an den Laschen des Kopfbandes, um die oberen und unteren Bänder gleichmäßig einzustellen.



7 Stellen Sie das Scheitelband so ein, dass das Kopfband bequem sitzt. Die Anpassung des Riemens auf dem Kopf gibt mehr Stabilität und verhindert, dass die Maske verrutscht und Leckagen in Richtung Augen auftreten.

8

Schließen Sie die Maske an ein betriebsbereites CPAP-Gerät an. Heben Sie die Maske unter Druck noch einmal leicht vom Gesicht ab und ermöglichen Sie dem Maskenkissen sich aufzustellen. Nehmen Sie nun die letzte Feineinstellungen vor.



Weitere Informationen zur Anpassung der Maske finden Sie in den mitgelieferten Gebrauchsanweisungen der Maske. Ein größerer Maskenrahmen ist ebenfalls auf Anfrage erhältlich.

Anleitung Schablone und Größenbestimmung AirFit N20

1. Speichern Sie die Anpassschablone. Diese finden diese unter "Downloads", unterhalb der Produktbeschreibung.

Größen:

Weiterführende Links zu "Amara View CPAP Vollgesichtsmaske"

- > Fragen zum Artikel?
- > Weitere Artikel von Philips Respironics

Verfügbare Downloads:

- > [Download Amara View Größenbestimmung Schablone](#) ←
- > [Download Anleitung zur Größenanpassung](#)

Unser Kommentar zu "Amara View CPAP Vollgesichtsmaske"

2. Beim Ausdruck den Punkt **Tatsächliche Größe** auswählen!

Zu druckende Seiten

- Alle
- Aktuelle Seite
- Seiten
- ▶ Weitere Optionen

Seite anpassen und Optionen ⓘ

- Anpassen
- Tatsächliche Größe**
- Übergroße Seiten verkleinern
- Benutzerdefinierter Maßstab: %
- Papierquelle gemäß PDF-Seitengröße auswählen
- Papier Beidseitig bedrucken

Ausrichtung:

Kommentare und form

Dokument: 118,2 x 154,2n
209,97 x 296,93 mm