

Bestelldaten

Artikelnummern Produkte und Zubehör

ApneaLink Air, Basis-Set	ApneaLink Air-Rekorder Software-CD Micro-USB-Kabel 1 wiederverwendbarer Gurt 3 Nasenbrillen Transporttasche 2 Batterien, Größe Micro (AAA)	22364
EasySense Effort-Sensor		22321
LP Oximetrie-Set	1 Xpod LP Oximeter 1 Xpod LP Oximeter-Clip 3 NONIN 7000A Einweg- Fingerflexsensoren	22380
Oximeter-Komponenten	Xpod LP-Oximeter	22374
	Xpod LP-Oximeter-Clip	22371
	NONIN wiederverwendbarer Softsensor (8000SS), klein, 7,5 – 12,5 mm	70582
	NONIN wiederverwendbarer Oximeter-Softsensor (8000SM), mittel, 10 – 19 mm	70584
Nasenbrillen	NONIN wiederverwendbarer Softsensor (8000SL), groß, 12,5 – 26,5 mm	70583
	Atemmess-Schläuche (Nasenbrillen), 25 Stück	70388
Weiteres Zubehör	Wiederverwendbarer Gurt	629052
	ApneaLink Air-Transporttasche	22373
	ApneaLink Air Software-CD, Version 10.2	22378
	Micro-USB-Kabel	22375

Technische Daten

Rekorder	Optimierte Hardware EasySense Effort-Sensor optional erweiterbar mit Oximetrie Leuchtanzeigen für • Atemfluss • Effort-Sensor • Oximetrie • abgeschlossene Untersuchung
Signalaufzeichnung	Atemfluss Atemanstrengung Schnarchen Sauerstoffsättigung Puls Batteriespannung
Datenübertragung	PC-Download via USB-Kabel
Interne Batterie	2 Alkalibatterien, Größe Micro (AAA)
Interner Speicher	Aufzeichnungszeitraum: 48 Stunden Interne Uhr
Abmessungen	Rekorder: 62 x 102 x 30 mm Pulsoximeter: 53 x 20 x 15 mm Gewicht des Rekorders: 66 g



Einfachstes Screening zu Hause

Mit dem neuen ApneaLink Air™ von ResMed steht Medizinern ein tragbares, leicht anzuwendendes und kostengünstiges Screeninggerät zur Verfügung, das Patienten mit Verdacht auf schlafbezogene Atmungsstörungen zu Hause anwenden können.

Jetzt kann ApneaLink Air wie bisher mit PC-Software oder serverbasiert mit AirView™ genutzt werden. Die Begleitung der Arbeitsabläufe in AirView vereinfacht die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Standorten und klinischen Nutzern.



ApneaLink Air mit AirView – die vollständige Lösung für die bessere Versorgung Ihrer Patienten

Mit seinem neuen, ansprechenden Design bietet ApneaLink Air die gewohnte Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit in einem kompakteren, leichteren und noch einfacher anzuwendenden Gerät. ApneaLink Air zeichnet bis zu sechs Datensignale auf (nasaler Atemfluss, Schnarchen, Sauerstoffsättigung, Pulsfrequenz, Atemanstrengung und Lage*).

Innovatives und elegantes Design mit hoher Benutzerfreundlichkeit

- gut sichtbare Anzeigeelemente für eine unmittelbare Rückmeldung der Sensorqualität und Aufzeichnungsstatus
- Ein-Knopf-Bedienung mit neuer, intuitiver Start-/Stopp-Taste
- Leuchtanzeige für erfolgreich abgeschlossene Untersuchung als Rückmeldung für den Anwender
- größere Speicherkapazität mit Möglichkeit mehrerer Aufzeichnungen bis zu 48 Stunden


Sofortiger Onlinezugriff auf Analyseergebnisse auf dem Server

ApneaLink Air ist in das serverbasierte Patientenmanagementsystem AirView integriert und erweitert damit das erfolgreiche Lösungsangebot von ResMed. AirView beseitigt diagnostische Engpässe und optimiert die Arbeitsabläufe vom ersten Screening bis zur Behandlung.

Die mit ApneaLink Air gemessenen Ergebnisse können auf einem Server in einer gesicherten Datenbank gespeichert werden. Der Datenzugriff von autorisierten Personen kann dann via Internet erfolgen.

Intuitive Screeninganzeige


- Alle Patienten auf einen Blick – mit dem aktuellen Status der Arbeitsabläufe
- Screening in drei einfachen Schritten

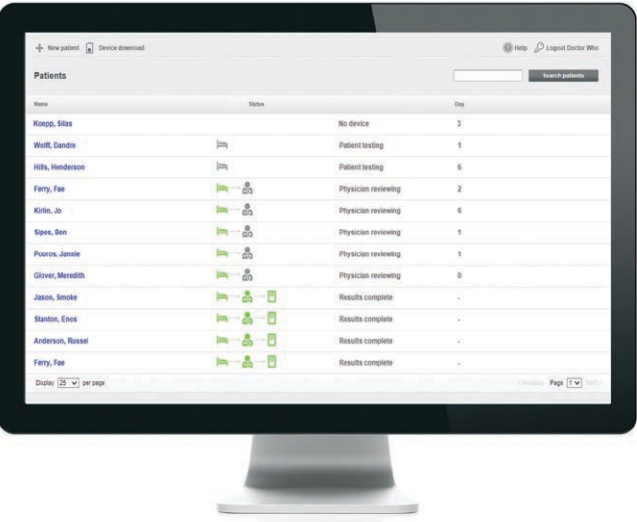

* Das Signal »Lage« wird nur in AirView angezeigt.

Hochentwickelte Analyse- und Berichtsfunktionen

- Zuverlässige automatische Analyse gemäß AASM-Richtlinien mit Cheyne-Stokes-Analyse und Differenzierung von obstruktiven und zentralen Apnoen (bei Verwendung des Effort-Sensors)
- Individuell anpassbare Analyseparameter (Wahl zwischen den drei Versionen der AASM-Richtlinien für die automatische Analyse – 2007, 2012 und Classic)
- Leicht verständliche farbkodierte Anzeige der Ergebnisse auf einer Seite
- Sichere elektronische Signatur

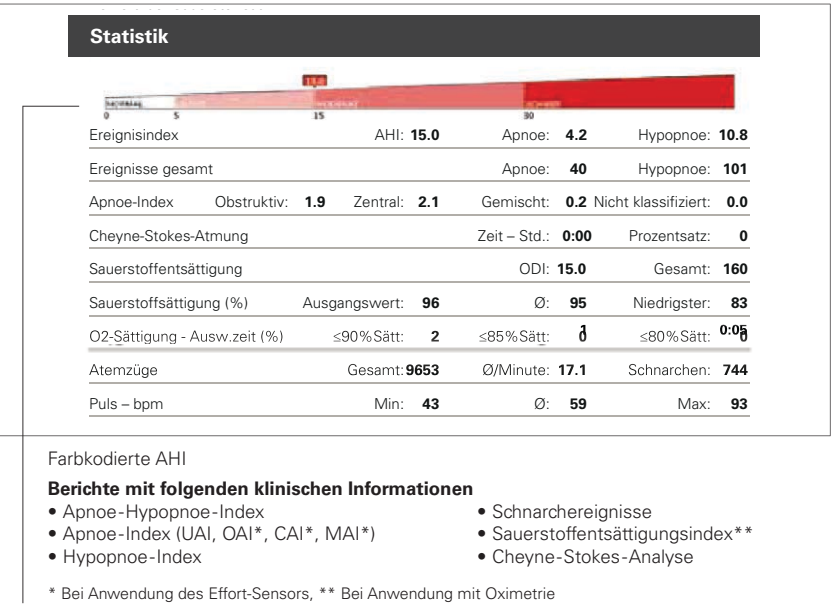

- Detaillierte Signalanzeige mit manueller Analysefunktion im unterstützten Browser

Einfache und schnelle Überprüfung über Gesamtansicht von Trenddaten und Ereignissen

In der detaillierten Drei-Minuten-Anzeige der Daten können die Ereignisse der automatischen Analyse manuell bearbeitet werden

