

PHILIPS

DreamStation Go


MyStart

Kurzanleitung – **DE**

Befolgen Sie diese Anweisungen bei der erstmaligen Einrichtung Ihres Geräts.

Stellen Sie die Uhrzeit auf Ihrem Gerät ein


1. Wischen Sie auf dem Bildschirm nach rechts oder links, um die Uhrzeit Ihrer Ortszeit anzupassen.
2. Tippen Sie zum Speichern der Zeiteinstellung auf den Bildschirm.

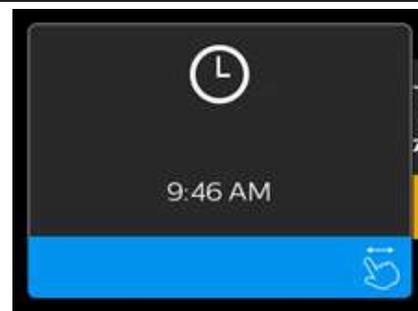

Einstellung Ihres MyStart-Drucks

Die MyStart-Komfortfunktion ermöglicht Ihnen die Einstellung Ihres Anfangsdrucks.

1. Wischen Sie auf dem Bildschirm nach rechts oder links, bis Sie die gewünschte Druckeinstellung sehen.
2. Tippen Sie zum Speichern der Druckeinstellung auf den Bildschirm.

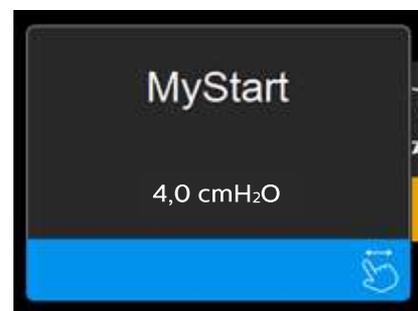

Die MyStart-Druckeinstellung kann jederzeit über das Menü „Mein Komfort“ geändert werden.

Tipps zur Einstellung der MyStart-Druckeinstellung ausgehend von den aktuellen CPAP-Einstellungen

- Wenn Sie die Rampenfunktion () auf Ihrem aktuellen CPAP verwenden, stellen Sie Ihren MyStart-Druck auf Ihren Rampen-Anfangsdruck ein.
- Wenn Sie die Rampenfunktion auf Ihrem aktuellen CPAP nicht verwenden, stellen Sie Ihren MyStart-Druck auf Ihren normalen Anfangsdruck ein.
- Weitere Informationen zu MyStart finden Sie im dem DreamStation Go-Gerät beiliegenden Benutzerhandbuch.