

Anpassleitfaden für AirFit F10



- Drücken Sie auf die seitlichen Laschen des Kniestücks und ziehen Sie dieses von der Maske ab.



- Nehmen Sie die unteren Kopfbänder ab. Der untere Rand des Maskenkissens sollte in der Kinnfalte aufliegen, der obere auf Augenwinkelhöhe verlaufen.
- Ziehen Sie das Kopfband über den Kopf.



- Lösen Sie die Klettverschlüsse der oberen Kopfbänder.
- Ziehen Sie beide Bänder gleichmäßig an, bis die Maske sicher und angenehm sitzt.



- Führen Sie die unteren Bänder unter den Ohren entlang und hängen Sie das Kopfband beidseitig in die Haken unten am Maskenrahmen ein.



- Ziehen Sie die unteren Kopfbänder gleichmäßig an, bis die Maske gut sitzt.
- Die Maske sollte bequem, aber fest und sicher sitzen. Die Bänder nicht zu fest anziehen!



- Verbinden Sie das Kniestück mit dem Schlauch des Therapiegerätes. Befestigen Sie es an der Maske, indem Sie die seitlichen Laschen des Kniestücks nach innen drücken.
- Schalten Sie das Therapiegerät ein.



- Die Fein Anpassung sollte im Liegen vorgenommen werden. Dazu die oberen Kopfbänder lösen und gleichmäßig justieren. Ziehen Sie sie so fest an, dass die Maske dicht sitzt.
- Die Maske ist nun einsatzbereit.



Zusätzliche Optionen

- Der untere Teil des Kopfbandes kann ober- oder unterhalb der Haare verlaufen.
- Zusätzlich können Komfortpolster den Tragekomfort der Maske im Wangenbereich erhöhen.



Hinweis: Weitere Einzelheiten finden Sie in der AirFit F10 Gebrauchsanweisung.

Optimale Position des Maskenkissens



Der untere Rand des Maskenkissens sollte in der Kinnfalte aufliegen, der obere in Augenwinkelhöhe verlaufen.



Die AirFit F10 liegt etwa in Augenhöhe auf der Nase auf.



Full Face Komfort in kompakter Größe

Die Full Face Maske AirFit™ F10 gehört zur neuen AirFit Maskenserie von ResMed. Tragekomfort und Anwenderfreundlichkeit sind durch das optimierte Design weiter verbessert. Das flexible Zusammenspiel zwischen Kopfband und Maskenrahmen ermöglicht höchsten Tragekomfort und hohe Stabilität, wie Sie es von ResMed Full Face Masken gewohnt sind.

Verbesserter Komfort

Das schlanke, extra-leichte Design ermöglicht freie Sicht, sodass mit der Maske gelesen, ferngesehen und sogar eine Brille getragen werden kann. In einer Patientenumfrage empfanden 75% der Befragten AirFit F10 angenehmer als ihre bisherige ResMed Full Face Maske*.

Bewährte Leistung

Das doppelwandige Maskenkissen mit Luftfedertechnologie bietet eine hervorragende Leckagesicherheit. Die Mehrheit der befragten Patienten gab an, dass AirFit F10 in Bezug auf Dichtigkeit und Stabilität die Eigenschaften ihrer bisherigen Full Face Maske von ResMed übertrifft.*

Einfache Anwendung

Das optimierte Design mit nur vier Komponenten erleichtert die Anpassung sowie das Auseinandernehmen, Reinigen und Zusammensetzen der Maske. Dank ihrer intuitiven Handhabung lässt sich AirFit F10 problemlos in die abendlichen Abläufe integrieren.

© 2014 ResMed GmbH & Co. KG. Art-Nr. 1077849 - 1 - 07/14

Schnelle Anpassung, einfache Verwendung



Eine neuere Studie von ResMed hat gezeigt, dass die meisten Patienten AirFit F10 in weniger als zwei Minuten passgerecht anlegen können.* Durch das optimierte Design mit nur vier Komponenten wird die Anwendung deutlich erleichtert – das spart wertvolle Zeit. Mit AirFit F10 können Sie sicher sein, die richtige Full Face Maske gewählt zu haben.

AirFit F10 Funktionen und Vorteile

Das weiche Kopfband aus hochwertigem Textilgewebe mit Rollkanten minimiert Druckstellen im Gesicht und ist angenehm zu tragen.



Obere Aufnahmhaken erleichtern das Abnehmen und Wiederanlegen des Kopfbandes.

Rahmen-Maskenkissen-Verbindung vereinfacht die Anbringung des Maskenkissens am Maskenrahmen.

Zirkuläre, diffuse Luftverteilung leitet die Luft weg vom Patienten und seinem Partner – für eine möglichst ungestörte Nachtruhe.

Kniestück mit Drucklaschen vereinfacht das Anbringen und Abnehmen des Kniestücks.

Extra-leichter Flexi-Rahmen bietet freie Sicht und sorgt für Stabilität.

Doppelwandiges SpringAir™ Maskenkissen bietet zuverlässige Abdichtung bei hohem Tragekomfort.

Untere Aufnahmhaken zum einfachen Anbringen der unteren Bänder verbessern die Anwenderfreundlichkeit.

Zusätzliche Komfortpolster sorgen für noch mehr Tragekomfort.



AirFit F10 Komponenten



Kniestück
62762

Maskenrahmen
63137 Extra Small/Small
63138 Medium/Large

Maskenkissen
62736 Extra Small
62737 Small
62738 Medium
62739 Large

AirFit F10 Kopfband
63165 Small
63164 Standard
63166 Large

AirFit F10 for Her Kopfband
63167 Small

Hinweis: Weitere Einzelheiten finden Sie in der AirFit F10 Gebrauchsanweisung.

Artikelnummern Maskensysteme


AirFit F10, Small	63105
AirFit F10, Medium	63106
AirFit F10, Large	63107
AirFit F10 for Her, Extra Small	63142
AirFit F10 for Her, Small	63143
AirFit F10 for Her, Medium	63144

Alle „for Her“-Maskensysteme werden mit dem „for Her“-Kopfband (Small) geliefert. Zu allen Standardmaskensystemen gehört ein Kopfband in Standardgröße (blau).



Tipps zur Größenbestimmung der AirFit F10

Verwenden Sie die Anpass-Schablone als Orientierungshilfe, um die richtige Größe der AirFit F10 Maske zu bestimmen. Dazu wird der untere Rand der Schablone an der Kinnfalte ausgerichtet. Empfohlen wird die Größe auf der Schablone, die sich auf Höhe des inneren Augenwinkels befindet.

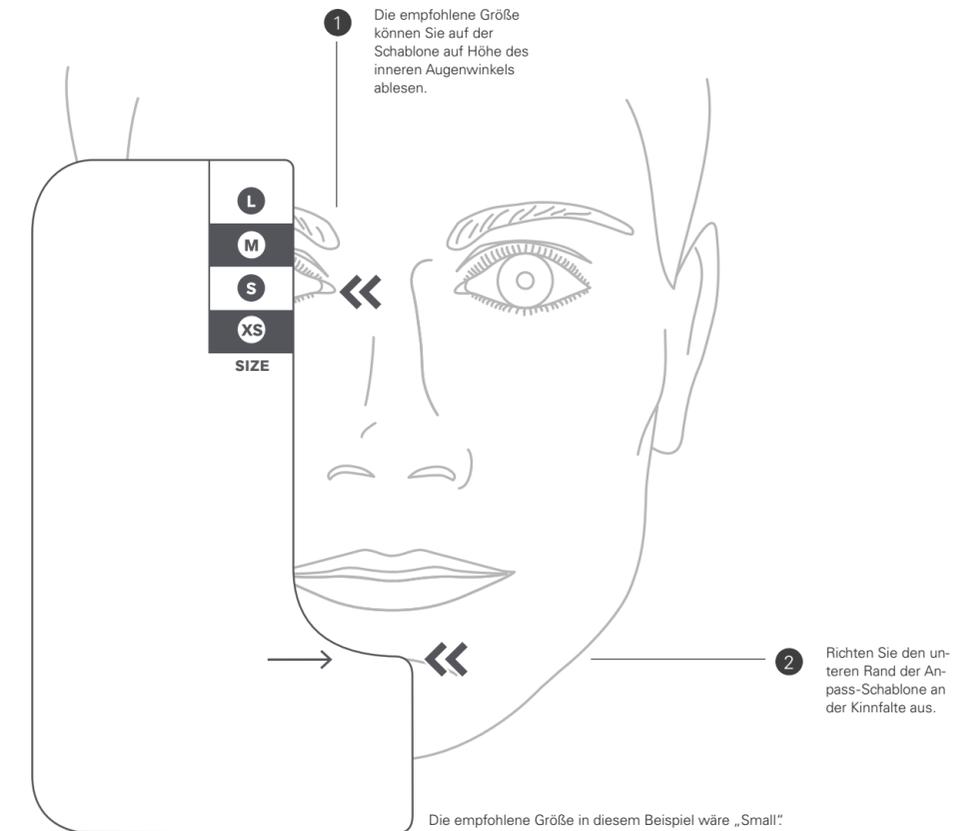

Nützliche Informationen

- Achten Sie darauf, dass der Mund des Patienten bei der Größenbestimmung geschlossen und entspannt ist.

*Interne vom 25. Juli – 4. September 2013 durchgeführte ResMed Studie, bei der ResMed Patienten ihre bisherige Full Face Maske von ResMed mit der AirFit F10 verglichen.