



Menüführung und Settings der DreamStation Go



Patienten Menü

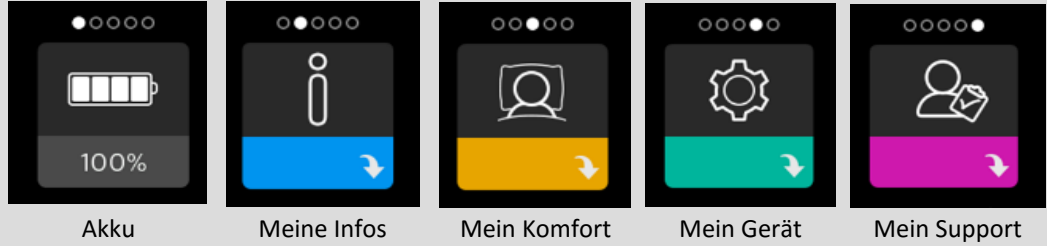

Provider Menü

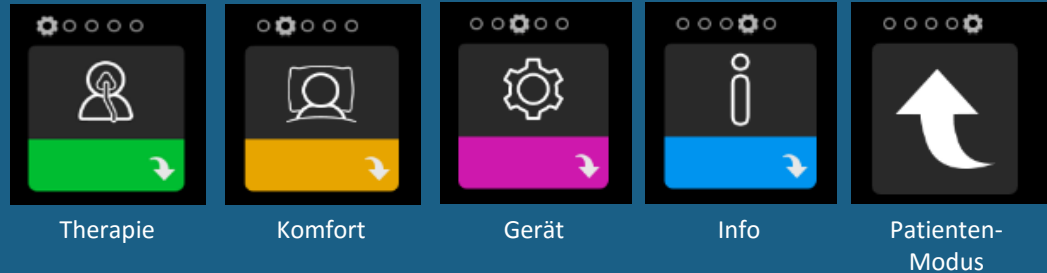

Patienten Menü

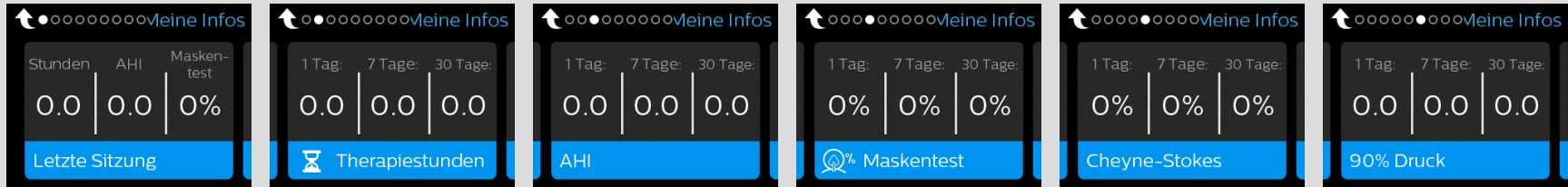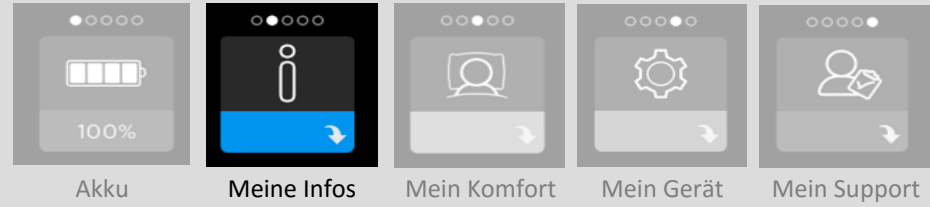

Zusammenfassung der letzten Sitzung von: Stunden, AHI und Maskentest

Therapiestunden Durchschnittswerte

AHI Durchschnittswerte

Maskentest Durchschnittswerte


Cheyne-Stokes Durchschnittswerte

90% Druck Durchschnittswerte



3 DreamMapper Informationsbildschirme



Patienten Menü

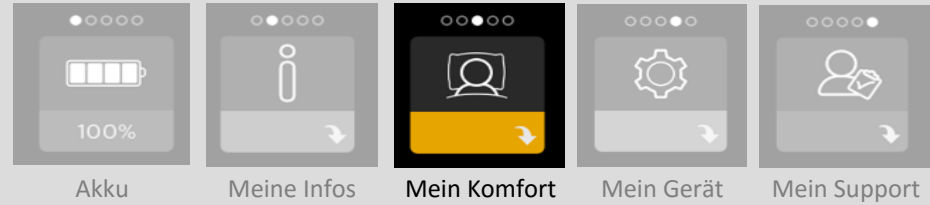



Standardmäßige Einstellung

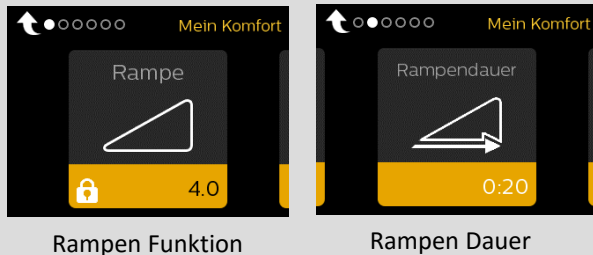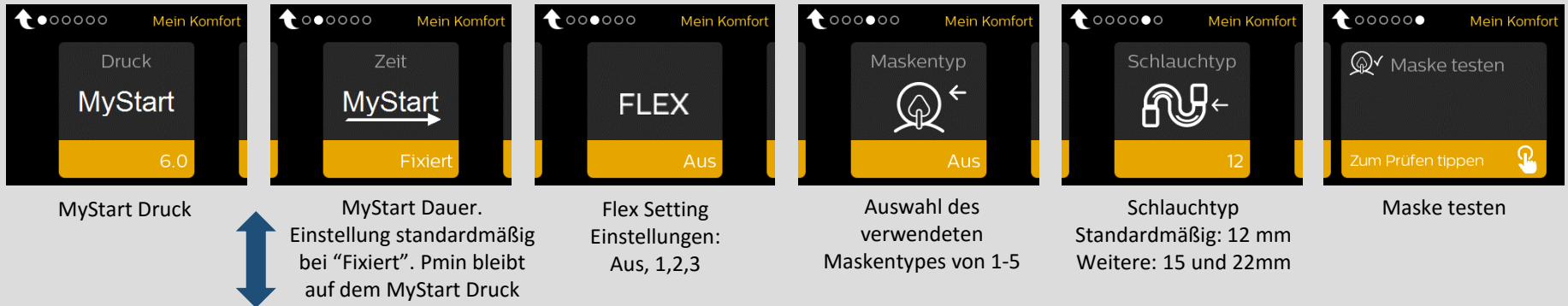


Erweiterte Einstellung durch den Provider

Die Rampenfunktion kann nur vom Provider aktiviert werden und ersetzt damit automatisch die MyStart Funktion. Alle anderen Einstellungen bleiben gleich.


Patienten Menü

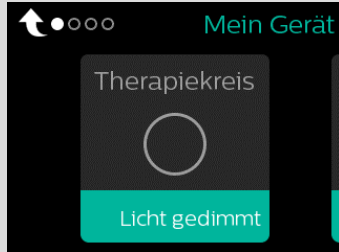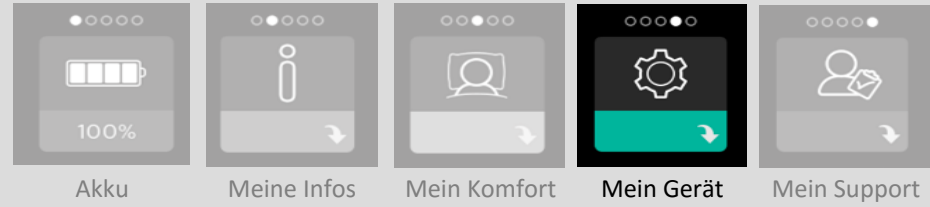


Therapiekreis Status. Standardmäßig wird der Therapiering während des Gebrauchs langsam ausgeschaltet.

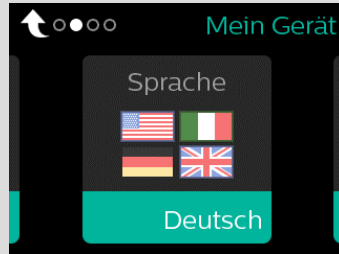

Auswahl Sprache:
Englisch, Deutsch,
Französisch, Italienisch,
Spanisch, Portugiesisch,
Dänisch, Finnisch,
Norwegisch, Schwedisch


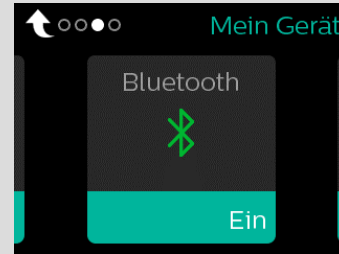


Bluetooth
Ein / Aus

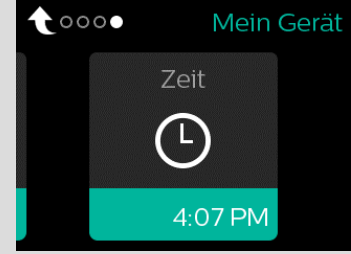

Uhrzeit Einstellung des
Gerätes. Auf lokale Zeit
setzen.

Patienten Menü

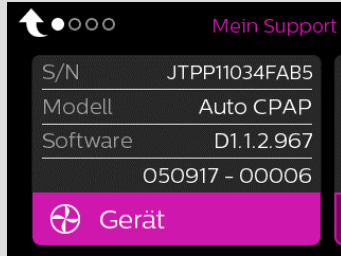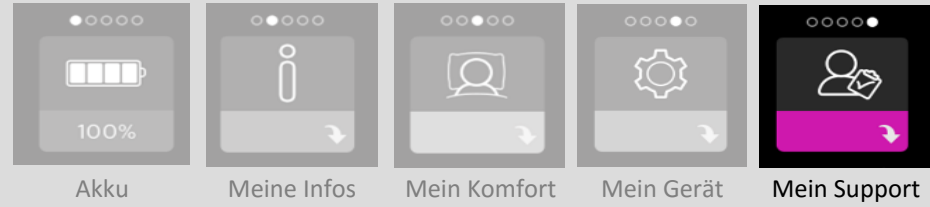

Zeigt Geräte Seriennummer, Modell Art und aktuelle Software Version



Therapiedaten. In diesem Fall: Auto CPAP Modus, Pmax von 20, Pmin von 4






Therapiestunden, Gebläse Stunden, Anzahl der Tage mit einer Nutzung von über 4 Stunden



Performance Check


Provider Menü

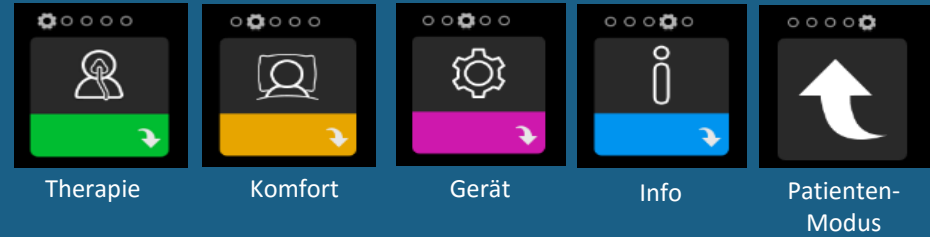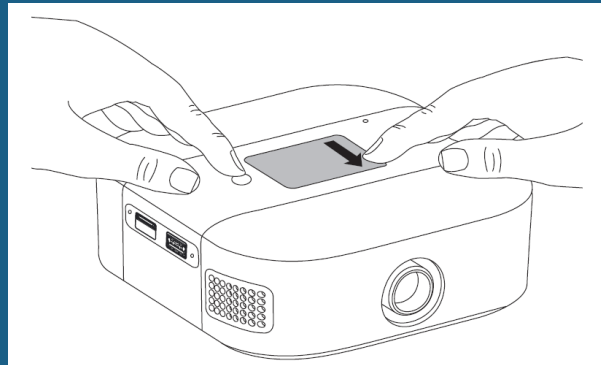


Wenn das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist, halten Sie den Ein-Aus-Schalter des Geräts mindestens 5 Sekunden lang gedrückt. Der erste Kreis im Bildschirm oben muss sich in ein Zahnradsymbol verwandeln. 

Scrollen Sie bei weiterhin gedrücktem Ein-Aus-Schalter des Geräts auf dem Bildschirm mit dem Finger nach unten.


Provider Menü

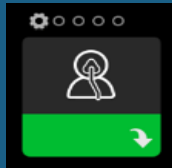


Therapie

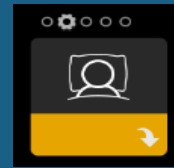


Komfort

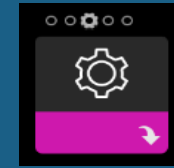


Gerät

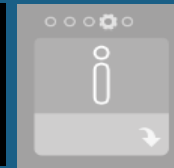



Info

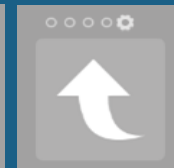

Patienten-Modus

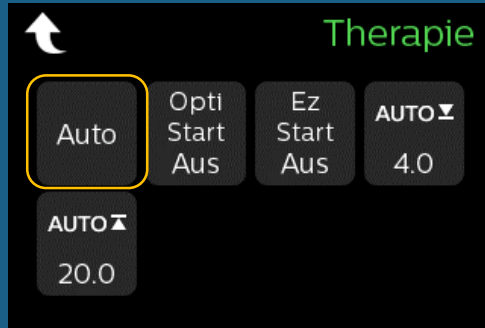


Wechsel von Auto auf CPAP möglich.

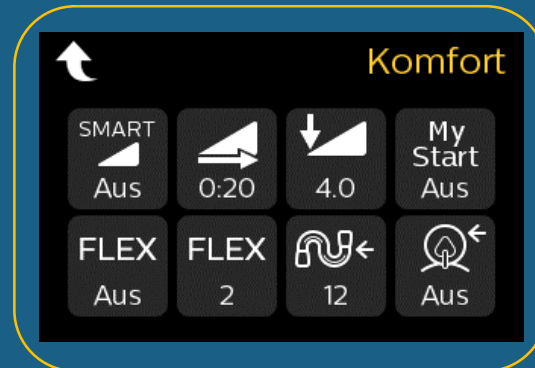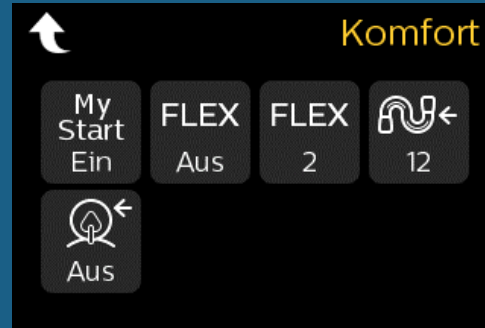


Rampen Funktion verfügbar wenn MyStart deaktiviert wird.


Provider Menü

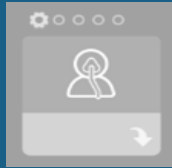


Therapie

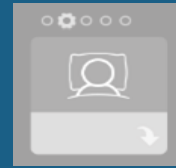


Komfort

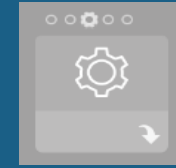


Gerät

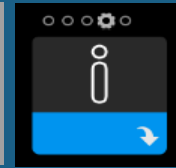

Info

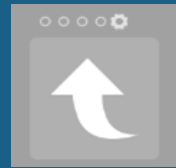

Patienten-Modus

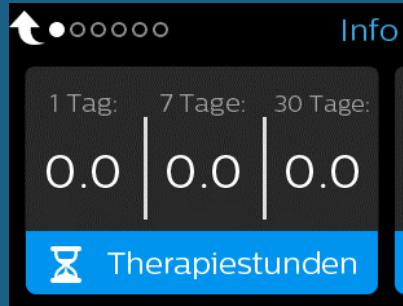

Nur im Provider Menü

