

Erklärung der Symbole

Deutsch

Symbol	Beschreibung
Diagnoseteststatus¹	
	Schlafuntersuchung des Patienten dauert an.
	Diagnosedaten für die Auswertung durch den Arzt liegen vor.
	Arzt hat die Diagnosedaten ausgewertet; elektronisch unterschriebener Bericht liegt vor.
	Die Befundung ist abgeschlossen und eine Verordnung für die Therapie ist erforderlich. ²
	Die Verordnung ist abgeschlossen und kann sich in verschiedenen Stadien befinden (Fertig zum Abschicken, Ergebnisse abgeschickt, Patient angenommen oder Patient zurücküberwiesen). ²
Datenübertragungstyp	
	Überwiesener Diagnosepatient, der eingerichtet werden muss ²
	Patientendaten werden nicht drahtlos übertragen
	Daten werden über SD-Karte heruntergeladen
	Patientendaten werden drahtlos übertragen
	Nur TeleService ²
Dashboard-Mitteilung	
	Änderung in der Verordnung des Patienten
	Der Patientendatei wurden Notizen hinzugefügt
	Diagnosebericht ²
	Therapieverordnungsbericht ²
Compliance-Status des Patienten	
	Compliance-Bedingungen erfüllt
	Compliance-Bedingungen nicht erfüllt

Symbol	Beschreibung	
Täglicher Compliance-Status		
Symbollegende:	Oben – AHI / Unten – Leckage - Unterhalb Schwellenwert (grün) - Oberhalb Schwellenwert (gelb) - Daten werden nicht unterstützt (weiß) Gesamtfarbe – Nutzung - Oberhalb Schwellenwert (grün) - Unterhalb Schwellenwert (rot)	
Nutzung oberhalb Schwellenwert	Nutzung unterhalb Schwellenwert	
		
		Starke Leckage
		Leckagedaten werden nicht unterstützt
		Hoher AHI
		AHI-Daten werden nicht unterstützt
		Hoher AHI, Leckagedaten werden nicht unterstützt
		Starke Leckage, AHI-Daten werden nicht unterstützt
		Hoher AHI, starke Leckage
		AHI, Leckagedaten werden nicht unterstützt
		Gerät nicht verwendet
		Datenübertragung – noch keine Daten empfangen
		Keine Datenübertragung – es liegen keine Daten vor
		Gerätefehler – es liegen keine Daten vor

¹ Das Symbol wechselt auf rot, wenn ein Patient nach 7 Tagen nicht zum nächsten Status übergegangen ist. Sobald der nächste Schritt abgeschlossen ist, wechselt das Symbol wieder auf grün.

² Diese Funktion steht nicht in allen Regionen zur Verfügung.



 **ResMed Ltd**
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153 Australia

VERTRIEB
ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA
EC|REP ResMed (UK) Ltd 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon
Oxfordshire OX14 4RW UK

Informationen zu weiteren Geschäftsstellen von ResMed weltweit finden Sie auf www.resmed.com. Informationen zu Patenten und sonstigen geistigen Eigentümern finden Sie auf www.resmed.com/ip. AirView ist eine Marke der ResMed Ltd. © 2016 ResMed Ltd. 228789/4 2016-01

ResMed.com