


Anleitung Schablone und Größenbestimmung AirFit N20

1. Speichern Sie die Anpassschablone. Diese finden diese unter "Downloads", unterhalb der Produktbeschreibung.



2. Beim Ausdruck den Punkt "Tatsächliche Größe" auswählen.

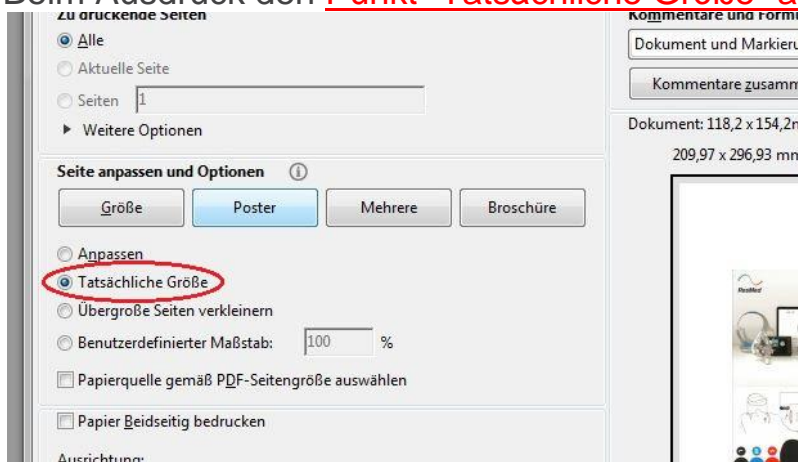

3. Schablone ausschneiden!
4. Schauen Sie in einen Spiegel. Halten Sie die Schablone an Ihr Gesicht. Der obere Schablonenrand sollte auf Höhe Ihrer Nasenwurzel verlaufen.
5. Am unteren Rand der Schablone können Sie ablesen, welche Maskengröße für Ihr Gesicht am besten geeignet ist. Die Größe, die auf einer Linie mit Ihrer Kinnfalte verläuft, wird Ihnen am besten passen.
6. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir, für einen höheren Tragekomfort die größere Größe zu wählen.
7. Statt eine Anpass-Schablone zu verwenden, können Sie auch mit einem Lineal den Abstand zwischen Ihrer Nasenwurzel (zwischen den Augen) und der Falte zwischen Unterlippe und Kinn ausmessen. Folgende Größen entsprechen den verschiedenen gemessenen Werten:
 - zwischen 23-37 mm: **Small**
 - zwischen 30-45 mm: **Medium**
 - zwischen 45-55 mm: **Large**